

**Pas za stomo – kililni pas trebušni art. 3056/3057/3052**  
**Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745**

**INDIKACIJE**

- postoperativno, po kirurških posegih stome
- pomaga pri preprečevanju trebušne – stomalne kile

**KONTRAINDIKACIJE**

Stranski učinki nošenja pripomočka niso znani, če se pripomoček uporablja za namene, ki so predvideni v indikacijah ter pod zdravstvenim nadzorom.

**OPOZORILA**

Obrnite se na strokovno usposobljeno ali zdravstvo osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo, kremami in mazili.

Izdelek ni sterilen.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost. Pas je narejen iz materialov, ki ne iritirajo kože

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

**NAVODILA ZA NOŠENJE** (glej slikovna navodila, ki so priložena)

Pas je sestavljen iz dveh delov:

- mehkejši del, kateri je prilagodljiv in ima nastavljivo luknjo
- pas za stabilizacijo
- pas ima standardno luknjo z premerom 7 cm

**SESTAVA**

Poglej na listek na izdelku

**NAVODILA ZA PRANJE**

Operite ročno z vodo (30 stopinj max) in nežnim milom. Izogibajte se uporabi detergentov. Sušite proč od virov toplote in sončnih žarkov. Ne likajte.

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

**OPOZORILA**

V primeru, kakršnih koli težav prenehajte z nošenjem ter se obrnite na vašega zdravnika. Pri hujših reakcijah nemudoma prenehajte z nošenjem ter obvestite prodajalca, distributerja, JAZMP ter proizvajalca SAFTE S.p.A.

**NAVODILA ZA NOŠENJE** (glej priložena slikovna navodila)

- odpremo škatlo v kateri je pripomoček ter ločimo pas in mehkejšo blazino z luknjo
- blazinico, ki ima prilagodljivo luknjo odprete
- ježek odlepite ter postavite okoli vrečke za stomo, nato ježek zalepite ponovno na blazino

**POZOR:**

**Blazinica mora biti postavljena tako, da je del, na katerega se zalepi pas obrne stran od kože. Prepričati se moramo, da se blazinica lepo prlega okoli stomalne vrečke (slika 1-2).**

- vzemite pas ter ga namestite tako, da zaobjamete okoli hrbta ter ga z ježki prilepite na levi ter desni trani blazinice, katero ste namestili okoli stomalne vrečke (slika št. 3). Z regulacijo levega in desnega ježka, si nastavite idealno kompresijo. Nato vrečko nežno prekrijete z blagom kateri je nameščen na pas (slika št. 4).

Blazinice za menjavo:

dobavljive so naslednje dimenzije blazinice, za okrog stomalne vrečke:

premer: 6 cm, 7cm, 8 cm

Art. 3054 za pas art. 3056 ter art. 3052

Art. 3053 za pas art. 3057

Proizvod je medicinski pripomoček razreda 1 in ima oznako CE v skladu s pravili 93/42/CEE (Direktiva o medicinskih proizvodih).

Proizvajalec: Saft S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223

Datum prevoda navodila: 19.03.2023

