



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Opornica za gleženj Orione, art. 489

**Pozor: izberite desno ali levo različico.**

### NAMESTITEV

Izberite ustrezno velikost. Odprite trak in nataknite izdelek. Del v črni barvi z dvojnimi tkanjem naj ostane pod stopalom. Zaprite trak. Izdelek namestite tako, da potegnete za zgornji ali spodnji del opornice za gleženj.

### OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem ali specialistom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in trajanja uporabe. Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo funkcionalnost. Materiali, uporabljeni pri izdelavi, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**NAVODILA ZA PRANJE** Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

**ODLAGANJE** Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

**POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt:

[meddev.vigilance@jazmp.si](mailto:meddev.vigilance@jazmp.si) Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: [info@safte.it](mailto:info@safte.it) Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223.

Kontakt: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)

Datum prevoda: 09.10.2025





orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Opornica za gleženj Orione, art. 489

**Pozor: izberite desno ali levo različico.**

### NAMESTITEV

Izberite ustrezno velikost. Odprite trak in natakните izdelek. Del v črni barvi z dvojnimi tkanjem naj ostane pod stopalom. Zaprite trak. Izdelek namestite tako, da potegneta za zgornji ali spodnji del opornice za gleženj.

### OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem ali specialistom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in trajanja uporabe. Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo funkcionalnost. Materiali, uporabljeni pri izdelavi, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**NAVODILA ZA PRANJE** Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

**ODLAGANJE** Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

**POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt:

[meddev.vigilance@jazmp.si](mailto:meddev.vigilance@jazmp.si) Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: [info@safte.it](mailto:info@safte.it) Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223.

Kontakt: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)

Datum prevoda: 09.10.2025

