

Pas za pravilno držo, art. 9797
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Pomaga vzdrževati pravilno pozicijo hrbta in ramen.

KONTRAINDIKACIJA

Izdelek ne uporabljamo, ko nam je odsvetovano nošenje kompresijskih izdelkov.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede prave številke, pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Izdelek ni sterilen.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo.

Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali po vseh nam znanih podatkih, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

NOŠENJE

Pripomoček nosimo na spodnjo majico. Pas postavimo točno na hrbtenico, spodnji rob pasu mora biti pod lopaticama. Ko je pas pravilno nameščen, ga simetrično prilagodite tako, da dosežete želeno stopnjo kompresije. 1) Postavite napravo na hrbet, 2) speljite trakove pod pazduho, 3) prekrížajte jih na sredini hrbta, 4) pritrdite jih z ježkom na sprednji strani. Daljša trakova lahko regulirate tako, da jih sprostite ali bolj nategnete.

NAVODILA ZA PRANJE

Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO

V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si



Pas za pravilno držo, art. 9797
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Pomaga vzdrževati pravilno pozicijo hrbta in ramen.

KONTRAINDIKACIJA

Izdelek ne uporabljamo, ko nam je odsvetovano nošenje kompresijskih izdelkov.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede prave številke, pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Izdelek ni sterilan.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo.

Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali po vseh nam znanih podatkih, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

NOŠENJE

Pripomoček nosimo na spodnjo majico. Pas postavimo točno na hrbtenico, spodnji rob pasu mora biti pod lopaticama. Ko je pas pravilno nameščen, ga simetrično prilagodite tako, da dosežete željeno stopnjo kompresije. 1) Postavite napravo na hrbet, 2) speljite trakove pod pazduho, 3) prekrížajte jih na sredini hrbta, 4) pritrdite jih z ježkom na sprednji strani. Daljša trakova lahko regulirate tako, da jih sprostite ali bolj nategnete.

NAVODILA ZA PRANJE

Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO

V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

