



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Opornica za zapestje Orione, art. 240

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE:

Poškodbe, po operativna stanja, vnetja, bolečine in rehabilitacija. Nestabilnost zapestja. Pomaga pri ohranjanju pravilne poravnave.

OPOZORILA:

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem in/ali tehničnim strokovnjakom za izbiro ustreznega modela, prave velikosti ter načina in časa uporabe. Opozorilo: pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, v splošnem, glede na naše izkušnje, ne povzročajo stranskih učinkov. Če pa se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte uporabljati pripomoček in se posvetujte z zdravnikom.

LASTNOSTI:

Podporne aluminijaste opornice: ena dlančna opornica v obliki žlice in dve stranski. Prilagojeno za uporabo na obeh rokah (obojestransko).

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt:

meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223.

Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

Datum prevoda: 09.10.2025





orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Opornica za zapestje Orione, art. 240

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE:

Poškodbe, po operativna stanja, vnetja, bolečine in rehabilitacija. Nestabilnost zapestja. Pomaga pri ohranjanju pravilne poravnave.

OPOZORILA:

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem in/ali tehničnim strokovnjakom za izbiro ustreznega modela, prave velikosti ter načina in časa uporabe. Opozorilo: pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, v splošnem, glede na naše izkušnje, ne povzročajo stranskih učinkov. Če pa se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte uporabljati pripomoček in se posvetujte z zdravnikom.

LASTNOSTI:

Podporne aluminijaste opornice: ena dlančna opornica v obliki žlice in dve stranski. Prilagojeno za uporabo na obeh rokah (obojestransko).

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223.

Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

Datum prevoda: 09.10.2025

