

**Art 405-403 – LINIJA ELASTIČNIH OPORNIC
KOLENSKE OPORNIC • OPORNIC ZA GLEŽENJ • STEGENSKE OPORNIC
MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745
INDIKACIJE**

Blage stopnje zvinov.
Nestabilnost sklepa.
Nategi in natrganine mišic.

KONTRAINDIKACIJE

Uporabljajte ob upoštevanju kompresije, ki jo določa pravilna velikost.
Ne uporabljajte v primeru akutnih poškodb.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravniškim in/ali strokovno tehničnim osebjem glede izbire modela, pravilne velikosti ter načina in časa uporabe.
Pripomoček ni sterilen. Ne nameščajte ga v stik z ranjeno kožo.
Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.
Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.
Materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, po naših izkušnjah v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov.
Če pa se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV

Izdelek namestite na ustrezen sklepni del tako, da je poravnan oziroma prilagojen zaporedju mišičnih gibov.
Izdelek prilagodite tako, da sledi naravni obliki telesa in med nošenjem ne povzroča motenj ali nelagodja.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODVODNJA

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si



Art 405-403 – LINIJA ELASTIČNIH SEGMENTOV
KOLENSKE OPORNICE • OPORNICE ZA GLEŽENJ • STEGENSKE OPORNICE
MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745
INDIKACIJE

Blage stopnje zvinov.
Nestabilnost sklepa.
Nategi in natrganine mišic.

KONTRAINDIKACIJE

Uporabljajte ob upoštevanju kompresije, ki jo določa pravilna velikost.
Ne uporabljajte v primeru akutnih poškodb.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravniškim in/ali strokovno tehničnim osebjem glede izbire modela, pravilne velikosti ter načina in časa uporabe.

Pripomoček ni sterilan. Ne nameščajte ga v stik z ranjeno kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.

Materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, po naših izkušnjah v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

Če pa se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV

Izdelek namestite na ustrezen sklepni del tako, da je poravnan oziroma prilagojen zaporedju mišičnih gibov.

Izdelek prilagodite tako, da sledi naravni obliki telesa in med nošenjem ne povzroča motenj ali nelagodja.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODVODNJA

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

