



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 127-128 ortopedski vložki MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 OPOZORILA**

Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih boleznih se posvetujte z medicinskim in/ali ortopedskim strokovnim osebjem.

Preverite, ali je izbrana velikost pravilna.

Številčenje ustreza tistemu, ki se običajno uporablja za obutev. Vložek vstavite v čevelj, pri čemer preverite, ali je za desno ali levo nogo.

Anatomska oblika vložka (obloženi del) mora biti v stiku s podplatom stopala.

Vložka ne vstavite samo v en čevelj, saj bi to povzročilo neravnovesje med nogama.

Pozor, pripomoček ni sterilan. Ne postavljajte neposredno na poškodovano kožo. V redkih primerih, če izdelek povzroči kontraindikacije ali bolečine, vložek takoj odstranite.

Pustite vložke v čevljih, ko jih ne uporabljate, saj bodo tako bolje ohranili obliko skozi čas.

V primeru močnega potenja nog priporočamo, da vložke pustite "posušiti" znotraj čevlja.

Če vložke izvlečete iz čevljev in jih pustite sušiti zunaj, se lahko njihova oblika zvije. V tem primeru jih preprosto vrnite nazaj v čevlje in s toploto stopala bodo spet dobile svojo obliko.

**POZOR:** močno priporočamo, da vložkov ne postavljate v stik z viri toplote (npr. radiatorji, peči itd.) ali na sonce.

V redkih primerih, če se po uporabi vložkov zgornji del premakne naprej preko spodnjega dela vložka, nežno dvignite zgornji del in ga vrnite v prvotni položaj.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Operite z vlažno krpo in nevtralnimi milom.

Izogibajte se neposredni potopitvi v vodo; pustite, da se vložek posuši stran od virov toplote, preden ga ponovno nosite.

### **ODSTRANITEV**

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

### **POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si





orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Ortoped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Art 127-128 ortopedski vložki

### MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

#### OPOZORILA

Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih boleznih se posvetujte z medicinskim in/ali ortopedskim strokovnim osebjem.

Preverite, ali je izbrana velikost pravilna.

Številčenje ustreza tistemu, ki se običajno uporablja za obutev. Vložek vstavite v čevelj, pri čemer preverite, ali je za desno ali levo nogo.

Anatomska oblika vložka (obloženi del) mora biti v stiku s podplatom stopala.

Vložka ne vstavite samo v en čevelj, saj bi to povzročilo neravnovesje med nogama.

Pozor, pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte neposredno na poškodovano kožo. V redkih primerih, če izdelek povzroči kontraindikacije ali bolečine, vložek takoj odstranite.

Pustite vložke v čevljih, ko jih ne uporabljate, saj bodo tako bolje ohranili obliko skozi čas.

V primeru močnega potenja nog priporočamo, da vložke pustite "posušiti" znotraj čevlja.

Če vložke izvlečete iz čevljev in jih pustite sušiti zunaj, se lahko njihova oblika zvije. V tem primeru jih preprosto vrnite nazaj v čevlje in s toploto stopala bodo spet dobile svojo obliko.

**POZOR:** močno priporočamo, da vložkov ne postavljate v stik z viri toplote (npr. radiatorji, peči itd.) ali na sonce.

V redkih primerih, če se po uporabi vložkov zgornji del premakne naprej preko spodnjega dela vložka, nežno dvignite zgornji del in ga vrnite v prvotni položaj.

#### NAVODILA ZA PRANJE

Operite z vlažno krpo in nevtralnimi milom.

Izogibajte se neposredni potopitvi v vodo; pustite, da se vložek posuši stran od virov toplote, preden ga ponovno nosite.

#### ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

#### POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione  
Jolie  
maman  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



ISO 9001: 2008  
BUREAU VERITAS  
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it