



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 9494 – Trebušni Pasovi- Križni pasovi- Ramenski oprtniki- Prsni/torakalni pasovi MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

Trebušni pasovi: Po kirurških posegih. Po porodu. Oslabitev trebušnih tkiv. Trebušna podpora. Preventivno pri športnih aktivnostih.

Ledveno-križni pasovi: Bolečine v ledvenem predelu. Ledvene bolečine z izvornim vzrokom v hrbtenici. Pooperativno okrevanje, kjer ni potrebna imobilizacija.

Ravnanje ramen: Za ohranjanje pravilnega položaja hrbta in ramen.

Prsni/ torakalni pasovi: Kompresija in podpora prsnega koša.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte, kadar je kompresija kontraindicirana.

Prsni pasovi: Večkratne poškodbe s pljučnim vključevanjem. Perforacija pljuč.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravstvenim ali tehničnim strokovnjakom za izbiro modela, pravilne velikosti, načina in trajanja uporabe. Pripomoček ni sterilen. Ne nanašajte na poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z napravo. Ne spreminjajte strukture naprave, da ne bi vplivali na njeno funkcionalnost. Materiali, uporabljeni za izdelavo naprave, po naših podatkih večinoma ne povzročajo neželenih učinkov. Če se ti pojavijo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NOŠENJE

Trebušni/križni pasovi: Napravo nosite čez spodnje perilo ali lahko oblačilo. Namestite napravo tako, da opore ostanejo na sredini hrbtenice, spodnji rob naj bo v višini trtice, nato zaprite in prilagodite pritrditev. Zapiranje uravnotežite, da dosežete željeno kompresijo.

Ravnanje ramen: Nosite kot nahrbtnik. Prilagodite zadnjo regulacijo za pravilen položaj.

Prsni pas: Namestite okoli trupa.

Torakalni pas : Namestite tako, da je zapiranje na nasprotni strani poškodbe.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

PRIJAVA NEŽELENIH DOGODKOV

Vsak incident, povezan z uporabo naprave, je treba prijaviti podjetju SAFTE S.p.A. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 9494 – Trebušni Pasovi- Križni pasovi- Ramenski oprtniki- Prsni/torakalni pasovi MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

Trebušni pasovi: Po kirurških posegih. Po porodu. Oslabitev trebušnih tkiv. Trebušna podpora. Preventivno pri športnih aktivnostih.

Ledveno-križni pasovi: Bolečine v ledvenem predelu. Ledvene bolečine z izvornim vzrokom v hrbtenici. Pooperativno okrevanje, kjer ni potrebna imobilizacija.

Ravnanje ramen: Za ohranjanje pravilnega položaja hrbta in ramen.

Prsni/ torakalni pasovi: Kompresija in podpora prsnega koša.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte, kadar je kompresija kontraindicirana.

Prsni pasovi: Večkratne poškodbe s pljučnim vključevanjem. Perforacija pljuč.

OPOZORILA

Za ustrezno uporabo se posvetujte z zdravstvenim ali tehničnim strokovnjakom za izbiro modela, pravilne velikosti, načina in trajanja uporabe. Pripomoček ni sterilen. Ne nanašajte na poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z napravo. Ne spreminjajte strukture naprave, da ne bi vplivali na njeno funkcionalnost. Materiali, uporabljeni za izdelavo naprave, po naših podatkih večinoma ne povzročajo neželenih učinkov. Če se ti pojavijo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NOŠENJE

Trebušni/križni pasovi: Napravo nosite čez spodnje perilo ali lahko oblačilo. Namestite napravo tako, da opore ostanejo na sredini hrbtenice, spodnji rob naj bo v višini trtice, nato zaprite in prilagodite pritrditev. Zapiranje uravnotežite, da dosežete želeno kompresijo.

Ravnanje ramen: Nosite kot nahrbtnik. Prilagodite zadnjo regulacijo za pravilen položaj.

Prsni pas: Namestite okoli trupa.

Torakalni pas : Namestite tako, da je zapiranje na nasprotni strani poškodbe.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

PRIJAVA NEŽELENIH DOGODKOV

Vsak incident, povezan z uporabo naprave, je treba prijaviti podjetju SAFTE S.p.A. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si

