



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 245 – OPORO PALCA ZA IMOBILIZACIJO MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE**

Rizartroza in artroza trapezno-karpalnega sklepa. Tendinitis in zvin palca. Bolečinska in vnetna stanja. Nestabilnost sklepov. Poškodbeni in pooperativni tretma.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ni znanih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

### **OPOZORILA**

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravstvenim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, pravilne velikosti ter načina in časa uporabe.

Naprava je ambidekstralna (primerna za obe roki).

Pozor: medicinski pripomoček ni sterilan.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo, odprte brazgotine ipd.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.

Materiali, uporabljeni pri izdelavi, običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo..

### **SESTAVA**

Glej škatlo.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Natančno upoštevajte navodila na etiketi. Zaprite ježke med seboj in operite z vodo in blagim milom, izogibajte se uporabi detergentov.

Sušenje: izdelek zavijte v čisto brisačo, da vpije vlago, nato ga posušite na sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne izpostavljajte sončni svetlobi.

### **ODLAGANJE**

Odložite v skladu z veljavnimi zakonodajnimi predpisi.

### **POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si



## NAMESTITEV



1. Popolnoma sprostite trakove (na zapestju in palcu), da boste lahko vstavili roko.
2. Vstavite roko in pravilno namestite palec, prilagodite aluminijasto opornico za željeno odmik palca.

3. Prilagodite trak na zapestju in ga pritrdite z ježkom (velcro).
4. Namestite palec v zanko, ki jo pritrdite s potegom traku z ježkom.



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 245 – OPORO PALCA ZA IMOBILIZACIJO MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE**

Rizartroza in artroza trapezno-karpalnega sklepa. Tendinitis in zvin palca. Bolečinska in vnetna stanja. Nestabilnost sklepov. Poškodbeni in pooperativni tretma.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ni znanih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

### **OPOZORILA**

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravstvenim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, pravilne velikosti ter načina in časa uporabe.

Naprava je ambidekstralna (primerna za obe roki).

Pozor: medicinski pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo, odprte brazgotine ipd.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti.

Materiali, uporabljeni pri izdelavi, običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo..

### **SESTAVA**

Glej škatlo.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Natančno upoštevajte navodila na etiketi. Zaprite ježke med seboj in operite z vodo in blagim milom, izogibajte se uporabi detergentov.

Sušenje: izdelek zavijte v čisto brisačo, da vpije vlago, nato ga posušite na sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne izpostavlajte sončni svetlobi.

### **ODLAGANJE**

Odložite v skladu z veljavnimi zakonodajnimi predpisi.

### **POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si



## NAMESTITEV



1. Popolnoma sprostite trakove (na zapestju in palcu), da boste lahko vstavili roko.
2. Vstavite roko in pravilno namestite palec, prilagodite aluminijasto opornico za željeno odmik palca.



3. Prilagodite trak na zapestju in ga pritrdite z ježkom (velcro).
4. Namestite palec v zanko, ki jo pritrdite s potegom traku z ježkom.

