



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 3057/3052 – STOMALNI PAS MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE**

- V pooperativnem obdobju po operacijah stome
- Pomaga preprečevati nastanek stomalnih kil

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ni predvidenih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

### **OPOZORILA**

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravniškim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, načina in trajanja uporabe.

Medicinski pripomoček ni sterilen.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi vplivali na njegovo funkcionalnost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo, v večini nam znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

### **NAVODILA ZA NAMESTITEV**

Pas je sestavljen iz 2 delov:

- mehak del pasu z prilagodljivo odprtino;
- stabilizacijski pas;
- pas ima standardni sprednji del z nastavljivo odprtino premera  $\emptyset$  7 cm. Glejte hrbtno stran za navodila o nošenju.

### **SESTAVA**

Glejte etiketo na izdelku.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Ročno pranje – Ne likajte – Ne belite – Sušite stran od virov toplote.

### **ODSTRANJEVANJE**

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

### **PRIJAVA DOGODKOV**

Vsak incident, povezan z uporabo pripomočka, je treba prijaviti podjetju SAFTE S.p.A. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si Datum



### NAMESTITEV / NOŠENJE

- Odprite embalažo in ločite sprednji del z odprtino od pasu;
- Vzemite sprednji del z odprtino in odprite ježek za zapiranje odprtine;
- Namestite odprtino sprednjega dela okoli odprtine stomalne vrečke in ponovno zaprite ježek sprednjega dela;

POZOR: sprednji del mora biti nameščen tako, da je satasta stran obrnjena proti koži. Prepričajte se, da je sprednji del pravilno nameščen okoli odprtine vrečke (Slika 1 - 2);

- Vzemite pas, ga speljite za hrbtom in namestite na sprednji del.

Namestitev pasu na sprednji del poteka tako, da oba roba (desni in levi) pasu pritrдите na sprednji del (Slika 3). Napetost pasu prilagodite tako, da približate ali oddaljite oba konca pasu na sprednjem delu. Ko je dosežena idealna napetost, zaprite zaključni del pasu iz lahke tkanine, s čimer pokrijete večji del vrečke (Slika 4).



### ZAMENLJIVI SPREDNJI DELI

Na zahtevo so na voljo sprednji deli z nastavljivo odprtino premera:

**6 cm – 7 cm – 8 cm**

**Art. 3054 za pas art. 3056**

**Art. 3053 za pas art. 3057**



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 3057/3052 – STOMALNI PAS MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE**

- V pooperativnem obdobju po operacijah stome
- Pomaga preprečevati nastanek stomalnih kil

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ni predvidenih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

### **OPOZORILA**

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravniškim osebjem in/ali strokovnjakom glede izbire modela, načina in trajanja uporabe.

Medicinski pripomoček ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi vplivali na njegovo funkcionalnost. Materiali, uporabljeni za izdelavo, v večini nam znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

### **NAVODILA ZA NAMESTITEV**

Pas je sestavljen iz 2 delov:

- mehak del pasu z prilagodljivo odprtino;
- stabilizacijski pas;
- pas ima standardni sprednji del z nastavljivo odprtino premera  $\varnothing$  7 cm. Glejte hrbtno stran za navodila o nošenju.

### **SESTAVA**

Glejte etiketo na izdelku.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Ročno pranje – Ne likajte – Ne belite – Sušite stran od virov toplote.

### **ODSTRANJEVANJE**

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

### **PRIJAVA DOGODKOV**

Vsak incident, povezan z uporabo pripomočka, je treba prijaviti podjetju SAFTE S.p.A. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si Datum



#### NAMESTITEV / NOŠENJE

- Odprite embalažo in ločite sprednji del z odprtino od pasu;
- Vzemite sprednji del z odprtino in odprite ježek za zapiranje odprtine;
- Namestite odprtino sprednjega dela okoli odprtine stomalne vrečke in ponovno zaprite ježek sprednjega dela;

POZOR: sprednji del mora biti nameščen tako, da je satasta stran obrnjena proti koži. Prepričajte se, da je sprednji del pravilno nameščen okoli odprtine vrečke (Slika 1 - 2);

- Vzemite pas, ga speljite za hrbtom in namestite na sprednji del.

Namestitev pasu na sprednji del poteka tako, da oba roba (desni in levi) pasu pritrdite na sprednji del (Slika 3). Napetost pasu prilagodite tako, da približate ali oddaljite oba konca pasu na sprednjem delu. Ko je dosežena idealna napetost, zaprite zaključni del pasu iz lahke tkanine, s čimer pokrijete večji del vrečke (Slika 4).



#### ZAMENLJIVI SPREDNJI DELI

Na zahtevo so na voljo sprednji deli z nastavljivo odprtino premera:

**6 cm – 7 cm – 8 cm**

**Art. 3054 za pas art. 3056**

**Art. 3053 za pas art. 3057**