

art. 3079-3083-3087-3089 TREBUŠNI PASOVI – KRIŽNI PASOVI- RAMENSKI OPRTNIKI-
PRSNİ/TORAKALNI PASOVI

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE TREBUŠNI PASOVI

Po operaciji. Po porodu. Sprostitev trebušnega tkiva. Podpora trebuha. Preventivno pri športnih aktivnostih.

Križni pasovi: Bolečine v ledvenem predelu. Lumbago hrbtnege izvora.

Pooperativni poteki, kjer imobilizacija ni potrebna.

Ramenski oprtniki: Za vzdrževanje pravilne drže hrbta in ramen.

TORAKALNI/REBNI PASOVI: Stiskanje in podpora prsnega koša.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte, kadar je kompresija kontraindicirana.

PRSNİ PASOVI: Več poškodb pljuč. Perforacija pljuč.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se obrnite na zdravstveno in/ali tehnično osebje, da izberete model, pravilno velikost, način in čas uporabe. Naprava ni sterilna. Ne sme priti v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil in krem v neposrednem stiku z napravo. Ne spreminjajte strukture, da ne bi spremenili njene funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo naprave, v večini primerov, ki so nam znani, izključujejo pojav neželenih učinkov. V primeru pojava neželenih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na zdravstvenega delavca.

NOŠENJE

TREBUŠNI/KRIŽNI PASOVI: Napravo nosite čez spodnje perilo ali lahka oblačila.

Napravo namestite tako, da opornice ostanejo na sredini ledvene hrbtenice, spodnji rob pa v višini trtice, nato pa nadaljujte z zapiranjem in prilagajanjem. Zapiranje prilagodite simetrično, da dosežete želeno kompresijo.

RAMENSKI OPRTNIK: nosite kot nahrbtnik. Za prilagoditev drže uporabite zadnjo nastavitev.

PRSNİ PAS : nosite trak okoli trupa.

TORAKALNI PAS: nosite tako, da je zapiranje na nasprotni strani poškodbe.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

POMEMBNO

V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer





s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

art. 3079-3083-3087-3089 TREBUŠNI PASOVI – KRIŽNI PASOVI- RAMENSKI OPRTNIKI-
PRSNİ/TORAKALNI PASOVI

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE TREBUŠNI PASOVI

Po operaciji. Po porodu. Sprostitev trebušnega tkiva. Podpora trebuha. Preventivno pri športnih aktivnostih.

Križni pasovi: Bolečine v ledvenem predelu. Lumbago hrbtnege izvora.

Pooperativni poteki, kjer imobilizacija ni potrebna.

Ramenski oprtniki: Za vzdrževanje pravilne drže hrbta in ramen.

TORAKALNI/REBNI PASOVI: Stiskanje in podpora prsnege koša.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte, kadar je kompresija kontraindicirana.

PRSNİ PASOVI: Več poškodb pljuč. Perforacija pljuč.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se obrnite na zdravstveno in/ali tehnično osebje, da izberete model, pravilno velikost, način in čas uporabe. Naprava ni sterilna. Ne sme priti v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil in krem v neposrednem stiku z napravo. Ne spreminjajte strukture, da ne bi spremenili njene funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo naprave, v večini primerov, ki so nam znani, izključujejo pojav neželenih učinkov. V primeru pojava neželenih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na zdravstvenega delavca.

NOŠENJE

TREBUŠNI/KRIŽNI PASOVI: Napravo nosite čez spodnje perilo ali lahka oblačila.

Napravo namestite tako, da opornice ostanejo na sredini ledvene hrbtenice, spodnji rob pa v višini trtice, nato pa nadaljujte z zapiranjem in prilagajanjem. Zapiranje prilagodite simetrično, da dosežete želeno kompresijo.

RAMENSKI OPRTNIK: nosite kot nahrbtnik. Za prilagoditev drže uporabite zadnjo nastavitev.

PRSNİ PAS : nosite trak okoli trupa.

TORAKALNI PAS: nosite tako, da je zapiranje na nasprotni strani poškodbe.

NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

POMEMBNO

V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer

