

## **Termična linija(LANA + ANGORA) ART. 84,81,90 Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745**

### **INDIKACIJE**

Revmatske bolezni, bolečine v sklepih in mišicah.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Uporabite v skladu s kompresijo, ki jo določi pravilna velikost.

### **OPOZORILO**

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem in/ali tehničnim strokovnjakom za izbiro ustreznega modela, prave velikosti ter načina in časa uporabe. Opozorilo: pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, v splošnem, glede na naše izkušnje, ne povzročajo stranskih učinkov. Če pa se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte uporabljati pripomoček in se posvetujte z zdravnikom.

### **NAVODILA ZA NAMESTITEV**

Postavite izdelek na njegov sklepi segment tako, da je poravnan ali prilagojen zaporedju gibanja mišic. Priprnite izdelek na način, da se prilagodi naravni obliki in ne povzroča neudobja med nošenjem

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

### **ODLAGANJE**

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

### **POMEMBNO V**

primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si Datum prevoda: 09.01.2025



## **Termična linija(LANA + ANGORA) ART. 84,81,90 Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745**

### **INDIKACIJE**

Revmatske bolezni, bolečine v sklepih in mišicah.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Uporabite v skladu s kompresijo, ki jo določi pravilna velikost.

### **OPOZORILO**

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem in/ali tehničnim strokovnjakom za izbiro ustreznega modela, prave velikosti ter načina in časa uporabe. Opozorilo: pripomoček ni sterilan. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, da ne bi spremenili njegove funkcionalnosti. Materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, v splošnem, glede na naše izkušnje, ne povzročajo stranskih učinkov. Če pa se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte uporabljati pripomoček in se posvetujte z zdravnikom.

### **NAVODILA ZA NAMESTITEV**

Postavite izdelek na njegov sklepi segment tako, da je poravnan ali prilagojen zaporedju gibanja mišic. Pripnite izdelek na način, da se prilagodi naravni obliki in ne povzroča neudobja med nošenjem

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

### **ODLAGANJE**

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

### **POMEMBNO V**

primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si Datum prevoda: 09.01.2025

