

Pas za stomo – kilni pas trebušni art. 3055
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Opora za stomalno vrečko, močno priporočljiva za dnevno uporabo, ko je potrebna večja opora.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preglejte pas. Pas je sestavljen iz dveh delov: notranjega dela z odprtino in zunanjega dela.

NAMESTITEV

1. Oblecite pas tako, da ga povlečete čez noge. Potegnite ga navzgor do vrečke (notranja odprtina mora biti na ravni stomalne vrečke).
2. Spodnji rob zunanjega dela pasu obrnite navzgor in ga potegnite do prsnega koša. Pas bo nameščen v položaju, ki je prikazan na sliki.
3. Stomalno vrečko potisnite skozi odprtino.
4. Zunanji del, ki ste ga prej dvignili (glejte točko 2), povlecite nazaj navzdol in ga raztegnite.
5. Spodnji del stomalne vrečke vstavite v žep, ki se nahaja na spodnjem delu zunanjega dela pasu.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo, kremami in mazili.

Izdelek ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter **JAZMP** (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si

Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt:

info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si Datum prevoda: 09.01.2025



Pas za stomo – kilni pas trebušni art. 3055
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Opora za stomalno vrečko, močno priporočljiva za dnevno uporabo, ko je potrebna večja opora.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preglejte pas. Pas je sestavljen iz dveh delov: notranjega dela z odprtino in zunanjega dela.

NAMESTITEV

1. Oblecite pas tako, da ga povlečete čez noge. Potegnite ga navzgor do vrečke (notranja odprtina mora biti na ravni stomalne vrečke).
2. Spodnji rob zunanjega dela pasu obrnite navzgor in ga potegnite do prsnega koša. Pas bo nameščen v položaju, ki je prikazan na sliki.
3. Stomalno vrečko potisnite skozi odprtino.
4. Zunanji del, ki ste ga prej dvignili (glejte točko 2), povlecite nazaj navzdol in ga raztegnite.
5. Spodnji del stomalne vrečke vstavite v žep, ki se nahaja na spodnjem delu zunanjega dela pasu.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo, kremami in mazili.

Izdelek ni sterilen.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter

JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si

Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt:

info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si Datum prevoda: 09.01.2025

