



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 99-100-101-104 – Petni vložki MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

NAVODILA

Pomagajo pri preprečevanju in zdravljenju:

Petni vložki: bolečine v peti (talalgije), burzitis, tendinitis, Ahilova tetiva, pri športni dejavnosti.

Vložki: bolečine v peti (talalgije), burzitis, metatarzalgija, plantarni fascitis, sladkorske noge, pri športni dejavnosti.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru kožnih izpuščajev, oteklina, odprtih ran ali rdečice.

OPOZORILA

Izberite pravilno številko velikosti. Vsak vložek/petni vložek postavite na pravo nogo, pri čemer preverite, ali je desna ali leva. Izdelek ne postavljajte v stik s poškodovano kožo. V redkih primerih, če izdelek povzroči draženje, izdelek odstranite. Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih bolezni se posvetujte z medicinskim osebjem. Izdelek ni sterilen. Material, uporabljen v izdelku, je lahko vnetljiv.

PRANJE

Operite v mlačni vodi brez mila ali detergentov. Ne ožemajte. Sušite stran od virov toplote. Ne sterilizirajte.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si



NAVODILA ZA UPORABO:

Izdelki so anatomsko oblikovani za pravilno prileganje stopalom glede na velikost.

Velikost je označena na embalaži ali na izdelku (R = desna, L = leva).

Ploski del vložka ali podplata postavite v stik z notranjim dnom čevlja. Anatomsko oblika vložka mora biti v stiku s stopalom.





orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 99-100-101-104 – Petni vložki

MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

NAVODILA

Pomagajo pri preprečevanju in zdravljenju:

Petni vložki: bolečine v peti (talalgije), burzitis, tendinitis, Ahilova tetiva, pri športni dejavnosti.

Vložki: bolečine v peti (talalgije), burzitis, metatarzalgija, plantarni fascitis, sladkorske noge, pri športni dejavnosti.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru kožnih izpuščajev, oteklin, odprtih ran ali rdečice.

OPOZORILA

Izberite pravilno številko velikosti. Vsak vložek/petni vložek postavite na pravo nogo, pri čemer preverite, ali je desna ali leva. Izdelek ne postavljajte v stik s poškodovano kožo. V redkih primerih, če izdelek povzroči draženje, izdelek odstranite. Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih bolezni se posvetujte z medicinskim osebjem. Izdelek ni sterilen. Material, uporabljen v izdelku, je lahko vnetljiv.

PRANJE

Operite v mlačni vodi brez mila ali detergentov. Ne ožemajte. Sušite stran od virov toplote. Ne sterilizirajte.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si



NAVODILA ZA UPORABO:

Izdelki so anatomsko oblikovani za pravilno prileganje stopalom glede na velikost.

Velikost je označena na embalaži ali na izdelku (R = desna, L = leva).

Ploski del vložka ali podplata postavite v stik z notranjim dnom čevlja. Anatomsko oblika vložka mora biti v stiku s stopalom.

