



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 200-210-211 – Elastične opornice za zapestje MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

Zvini, okrevanje po poškodbah, uporaba pri športnih dejavnostih.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru akutnih poškodb.

OPOZORILA

Pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Preverite pravilno velikost.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, praviloma ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV

Elastične opornice: nadenite pripomoček na zapestje in prilagodite oporo z ježkom.

SESTAVA

Glej etiketo na izdelku.

NAVODILA ZA PRANJE

Strogo upoštevajte navodila na etiketi.

ODLAGANJE

Odložite v skladu s predpisi veljavne zakonodaje.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 200-210-211 – Elastične opornice za zapestje MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

Zvini, okrevanje po poškodbah, uporaba pri športnih dejavnostih.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru akutnih poškodb.

OPOZORILA

Pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Preverite pravilno velikost.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni za izdelavo pripomočka, praviloma ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV

Elastične opornice: nadenite pripomoček na zapestje in prilagodite oporo z ježkom.

SESTAVA

Glej etiketo na izdelku.

NAVODILA ZA PRANJE

Strogo upoštevajte navodila na etiketi.

ODLAGANJE

Odložite v skladu s predpisi veljavne zakonodaje.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

