



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 515-516-519-536-560-313-316-319 – HLAČKE ZA KILO MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

INDIKACIJE

Zadrževanje reducibilnih dimeljskih kil.

Po operacijah dimeljske kile pripomorejo k zgodnji mobilizaciji in preprečevanju ponovitev.

Koristne pri delu in športnih dejavnostih.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru uščipnjene (strangulirane) kile.

Ne nanašajte na poškodovano kožo.

LASTNOSTI

Izdelek ima dva notranja žepa za vstavljanje posebnih blazinic, ki so priložene v embalaži.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravnikom ali strokovnjakom glede izbire modela, ustrezne velikosti, načina in trajanja uporabe.

Izdelek ni sterilan.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z izdelkom.

Ne spreminjajte strukture izdelka, da ne bi vplivali na njegovo funkcionalnost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo, v večini nam znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo kakršnikoli stranski učinki, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV/NOŠENJE

Izdelek nosite neposredno na koži kot običajne spodnje hlače.

Orione hlače za kilo so opremljene z 2 standardnima penastima blazinicama.

Lahko jih nosite z blazinicami ali brez njih. (Glejte QR kodo na embalaži)

VZDRŽEVANJE

Sledite navodilom na notranji etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

NEŽELENI DOGODKI


Vsak resen incident, povezan z uporabo izdelka, je treba prijaviti podjetju **SAFTE S.r.l.** in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si Datum



PRAVILNO NAMEŠČANJE PELOTNIH BLAZINIC

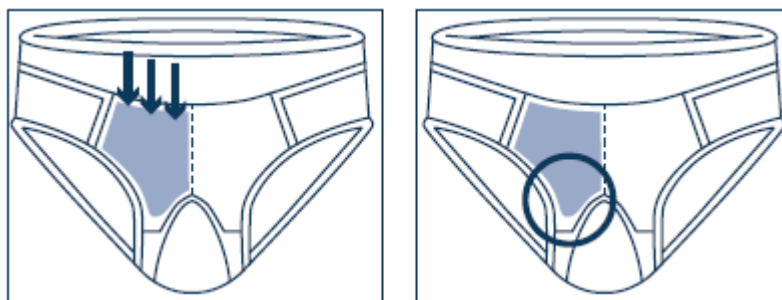

KAKO VSTAVITI PELOTE V NOTRANJE ŽEPKE SPODNJIH HLAČK

Peloto vstavite na desni ali levi strani, glede na mesto kjer se nahaja kila.
V primeru obojestranske kile vstavite obe peloti.



Art. 313



Art. 316



Art. 319



Art. 515



Art. 516



Art. 560



Art. 519



Art. 536



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

**Art 515-516-519-536-560-313-316-319 – HLAČKE ZA KILO
MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745
INDIKACIJE**

Zadrževanje reducibilnih dimeljskih kil.

Po operacijah dimeljske kile pripomorejo k zgodnji mobilizaciji in preprečevanju ponovitev.

Koristne pri delu in športnih dejavnostih.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte v primeru uščipnjene (strangulirane) kile.

Ne nanašajte na poškodovano kožo.

LASTNOSTI

Izdelek ima dva notranja žepa za vstavljanje posebnih blazinic, ki so priložene v embalaži.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z zdravnikom ali strokovnjakom glede izbire modela, ustrezne velikosti, načina in trajanja uporabe.

Izdelek ni sterilan.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z izdelkom.

Ne spreminjajte strukture izdelka, da ne bi vplivali na njegovo funkcionalnost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo, v večini nam znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo kakršnikoli stranski učinki, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

NAMESTITEV/NOŠENJE

Izdelek nosite neposredno na koži kot običajne spodnje hlače.

Orione hlačke za kilo so opremljene z 2 standardnima penastima blazinicama.

Lahko jih nosite z blazinicami ali brez njih. (Glejte QR kodo na embalaži)

VZDRŽEVANJE

Sledite navodilom na notranji etiketi.

ODSTRANJEVANJE

Odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

NEŽELENI DOGODKI


Vsak resen incident, povezan z uporabo izdelka, je treba prijaviti podjetju **SAFTE S.r.l.** in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si Datum



PRAVILNO NAMEŠČANJE PELOTNIH BLAZINIC

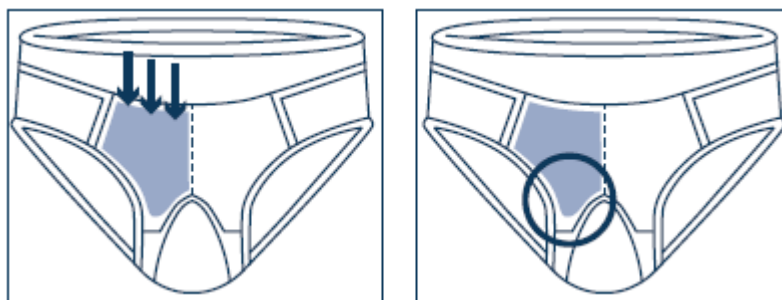

KAKO VSTAVITI PELOTE V NOTRANJE ŽEPKE SPODNJIH HLAČK

Peloto vstavite na desni ali levi strani, glede na mesto kjer se nahaja kila.
V primeru obojestranske kile vstavite obe peloti.



Art. 313



Art. 316



Art. 319



Art. 515



Art. 516



Art. 560



Art. 519



Art. 536