

**Art 117 – KOMPRESIJSKA NOGAVICA  
MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745  
INDIKACIJE**

Elastične bombažne nogavice Orione so zasnovane tako, da zagotavljajo pravilno stopnjevano kompresijo, ob tem pa ohranjajo eleganten videz nogavic do kolen. Tako spodbujajo krvni obtok in odpravljajo neprijetnosti, kot so otekanje, krčne žile in utrujenost. Posebna oblika meč in pete za boljše prileganje. Posebna tkanina zagotavlja visoko zračnost kože.

Idealne za uporabo pri delu, športu ali potovanjih.

**KONTRAINDIKACIJE**

Sladkorna bolezen, dermatitis ali arterijske bolezni.

**OPOZORILA**

Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne nameščajte ga na poškodovano kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z izdelkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi vplivali na njegovo delovanje.

Materiali, uporabljeni v izdelku, v večini znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

V primeru pojava stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**ODSTRANJEVANJE ODPADKOV**

Odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

**POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 117 – KOMPRESIJSKA NOGAVICA MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 INDIKACIJE**

Elastične bombažne nogavice Orione so zasnovane tako, da zagotavljajo pravilno stopnjevano kompresijo, ob tem pa ohranjajo eleganten videz nogavic do kolen. Tako spodbujajo krvni obtok in odpravljajo neprijetnosti, kot so otekanje, krčne žile in utrujenost. Posebna oblika meč in pete za boljše prileganje. Posebna tkanina zagotavlja visoko zračnost kože.

Idealne za uporabo pri delu, športu ali potovanjih.

### **KONTRAINDIKACIJE**

Sladkorna bolezen, dermatitis ali arterijske bolezni.

### **OPOZORILA**

Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne nameščajte ga na poškodovano kožo.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku z izdelkom.

Ne spreminjajte strukture medicinskega pripomočka, da ne bi vplivali na njegovo delovanje.

Materiali, uporabljeni v izdelku, v večini znanih primerov ne povzročajo stranskih učinkov.

V primeru pojava stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

### **ODSTRANJEVANJE ODPADKOV**

Odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

### **POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si

