



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Art 250 – Opornica za epikondilitis

### MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

#### INDIKACIJE

Epikondilitis (teniški komolec).

Epitrohleitis (golferski komolec).

#### KONTRAINDIKACIJE

Ni znanih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

#### OPOZORILA

Pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Prvo namestitev naj opravi usposobljeno osebje.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj to lahko vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Pripomočka ne uporabljajte, če opazite znake obrabe.

#### NAMESTITEV

Namestite trak približno 3 cm pod komolec.

Prilagodite zapiranje z ježkom (velcro) tako, da ustvarite priporočeno napetost po navodilih.

#### SESTAVA

Glej etiketo na izdelku.

#### NAVODILA ZA PRANJE

Upoštevajte navodila na etiketi.

#### ODLAGANJE

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

#### POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



ISO 9001:2008  
BUREAU VERITAS  
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## **Art 250 – Opornica za epikondilitis MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745**

### **INDIKACIJE**

Epikondilitis (teniški komolec).

Epitrohleitis (golferski komolec).

### **KONTRAINDIKACIJE**

Ni znanih kontraindikacij, če se pripomoček uporablja v skladu z navodili in pod zdravniškim nadzorom.

### **OPOZORILA**

Pripomoček ni sterilen.

Ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo.

Prvo namestitev naj opravi usposobljeno osebje.

Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom.

Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj to lahko vpliva na njegovo delovanje.

Po naših izkušnjah materiali, uporabljeni pri izdelavi pripomočka, običajno ne povzročajo stranskih učinkov.

Če se pojavijo kakršni koli stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Pripomočka ne uporabljajte, če opazite znake obrabe.

### **NAMESTITEV**

Namestite trak približno 3 cm pod komolec.

Prilagodite zapiranje z ježkom (velcro) tako, da ustvarite priporočeno napetost po navodilih.

### **SESTAVA**

Glej etiketo na izdelku.

### **NAVODILA ZA PRANJE**

Upoštevajte navodila na etiketi.

### **ODLAGANJE**

Odložite v skladu z veljavno zakonodajo.

### **POROČILA**

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si

