

Petna povišica Okped Orione
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Primerna za kompenzacijo dismetrij in za rahlo razbremenitev pete

KONTRAINDIKACIJE

Izdelek ni sterilen. Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo. Povišica mora biti uporabljena znotraj čevlja. V primeru kožnih intoleranc, neprijetnih sprememb ali nepredvidenih mišičnih bolečin, se posvetujte z zdravnikom ali strokovno usposobljenim osebjem.

NAVODILA ZA UPORABO

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe. Prepričajte se, da je izbrana velikost pravilna. Prevljučeni del izdelka mora biti v stiku s spodnjo stranjo stopala. Stran izdelka, ki pride v stik z obutvijo, vsebuje lepilni trak za lažje nameščanje.

NAVODILA ZA PRANJE

Uporabite vlažno krpo za odstranjevanje prahu. Ne uporabljajte detergentov.

SESTAVA: umetna pluta, usnje, samolepljiv trak

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: info@jazmp.si
Proizvajalec: Safta S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safta.it
Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si
Datum prevoda: 09.10.2024



Petna povišica Okped Orione
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z uredbo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Primerna za kompenzacijo dismetrij in za rahlo razbremenitev pete

KONTRAINDIKACIJE

Izdelek ni sterilen. Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo. Povišica mora biti uporabljena znotraj čevlja. V primeru kožnih intoleranc, neprijetnih sprememb ali nepredvidenih mišičnih bolečin, se posvetujte z zdravnikom ali strokovno usposobljenim osebjem.

NAVODILA ZA UPORABO

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe. Prepričajte se, da je izbrana velikost pravilna. Prevlučeni del izdelka mora biti v stiku s spodnjo stranjo stopala. Stran izdelka, ki pride v stik z obutvijo, vsebuje lepilni trak za lažje nameščanje.

NAVODILA ZA PRANJE

Uporabite vlažno krpo za odstranjevanje prahu. Ne uporabljajte detergentov.

SESTAVA: umetna pluta, usnje, samolepljiv trak

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

POMEMBNO V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: info@jazmp.si
Proizvajalec: Safta S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safta.it
Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si
Datum prevoda: 09.10.2024

